



Suma Med Super LpH

Maskindiskmedel för disk- och spoldesinfektorer

Produktbeskrivning

Suma Med Super LpH är en koncentrerad specialprodukt för disk- och spoldesinfektorer. Produktens unika sammansättning gör produkten lågalkalisk samtidigt som den effektivt löser smutsen i mjuka och medelhårda vatten.

Produktegenskaper

Suma Med Super LpH är ett lågalkaliskt maskindiskmedel anpassat för disk- och spoldesinfektorer. Produkten är speciellt formulerad för instrumentdisk, rondskålar, anesthesiutrustning och bidéskålar. Kan även användas till kärlkokare och maskindisk. Produkten passar i mjuka och medelhårda vatten.

Produktfördelar


- Löser effektivt smuts och intorkat blod
- Koncentrerad produkt ger låg användarkostnad
- Motverkar kalkbildning i diskmaskinen

Bruksanvisning

Suma Med Super LpH doseras normalt med automatisk doseringsutrustning 1 - 3 ml/l. Koppla dunken till doseringsautomatiken/doseringslangen som sedan automatiskt doserar rätt mängd.

Lokala förhållanden avgör den exakta doseringsmängden.

CE

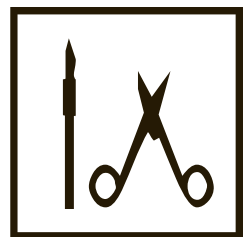

° A.I.S.E.

**Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.*



Suma Med Super LpH

Teknisk information

Utseende: Klar färglös vätska

pH (1% lösning vid 20°C): 11.4

Relativ densitet (20°C): 1.15

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Att beakta

Om produkten används enligt bruksanvisning kan Suma Med Super LpH användas på dom flesta vanligen förekommande material inom sjukvården. Använd ej på material som är känsliga för alkali.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

2x5 L Dunk

20 L Dunk

200 L Fat