



Kalibrering FR-MS 200kg/100g

Kalibreringsläge

1. Håll tangenten [HOLD/BMI] intryckt och starta vågen och tryck därefter tre gånger på tangenten [UNIT/WEIGHT]. Displayen visar nu "CALALukg" (tryck på tangenten [HOLD/BMI] för att välja kalibreringsenhet).
2. Tryck på tangenten [ZERO] varvid ADAD-värdet visas på displayen. Tryck åter på knappen [ZERO] varvid displayen visar "SAVE" och därefter kalibreringsvikten.
3. Ställ på vågen den kalibreringsvikt som visades på displayen (standard 200kg).
4. Tryck åter på knappen [ZERO] varvid displayen visar "SAVE" och återgår därefter till att visa ADAD-värdet. Kalibreringsvikten är nu utförd.

Ändra kalibreringsvikt:

1. Håll tangenten [HOLD/BMI] intryckt och starta vågen och tryck därefter tre gånger på tangenten [UNIT/WEIGHT] varefter displayen visar "SET".
2. Tryck på [HOLD/BMI] för att stega ner i menyn till "CAL" och [UNIT/WEIGHT] för att gå in i en meny för att ändra värden.
3. Tryck på [TARE] för att stega åt höger och använd [ZERO] för att öka värdet.
Gå ur inställningen för kalibreringsvikt och ut till "CAL" igen med [HOLD/BMI].
4. Gå in i kalibreringsläget och gör om kalibreringen med nya kalibreringsvikten.