


EasyRoll Draglakan / 2way

EasyRoll Draglakan används i kombination med EasyRoll Glidlakan. Draglakanet läggs direkt på glidlakanet och brukaren ligger på draglakanet. Kombinationen glidlakan och draglakan blir då ett mycket bra hjälpmedel att enkelt vända en liggande vårdtagare. Genom att greppa i draglakanet och dra i detta förflyttas brukaren till avsedd position mycket enkelt och smidigt.

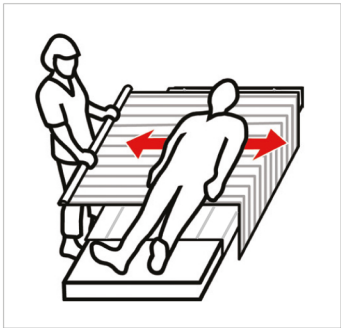

Produktöversikt EasyRoll Draglakan

Art. nr.	Produktnamn	Passar madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidzon (cm)	Färg	Funktionalitet	Övrigt	Glidriktning
2101	EasyRoll Draglakan	-	100	185	-	Vit	Draglakan	Markeringsränder som indikerar dragriktning.	Art. nr. 2101
2101S	EasyRoll Draglakan	-	140	200	-	Blå/vitrandig	Draglakan		Art. nr. 2101S

Material: 2101: Bomull 2101S: Polyester/bomull
Skötselråd: Tvättas före första användning. Torkning/tumling i max 70°.




CE Medicinteknisk klass I produkt

EasyRoll 4Way Gliddraglakan

EasyRoll Gliddraglakan / 4way

Detta gliddraglakan bäddas direkt ovanpå ett glidlakan, med glidytorna mot varandra. EasyRoll Gliddraglakan är ett arbetstekniskt hjälpmedel för vårdpersonal för enkel vändning/förflyttning av en liggande brukare. Vid vändning av brukare lossas gliddraglakanet från madrassen. Vårdgivaren greppar gliddraglakanet vid brukarens höft och skuldra och ser till att fylla händerna med tyg. Sedan arbetar vårdgivaren med raka handleder och tyngdöverföring för att luta sig bakåt. Är man två medhjälpare kan den andre hjälpa till genom att trycka nedåt vid skuldra och höft på motsatt sida och skjuta på. Sedan vänds brukaren. Efter genomförd vändning bäddas gliddraglakanet fast på båda sidorna av madrassen.

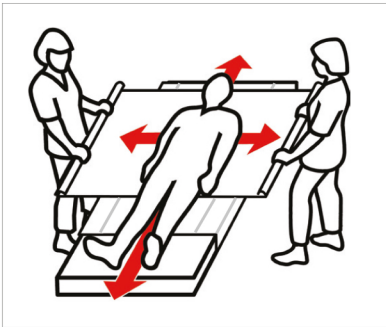

Produktöversikt EasyRoll Gliddraglakan / 4Way

Art. nr.	Produktnamn	Passar madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidzon (cm)	Färg	Funktionalitet	Övrigt	Glidriktning
4011S	EasyRoll Gliddraglakan	-	140	210	-	Vit/blå	Gliddraglakan		Art. nr. 4011S
4011L	EasyRoll Gliddraglakan	-	200	210	-	Vit/blå	Gliddraglakan		Art. nr. 4011L
4011S1	EasyRoll Gliddraglakan	-	150	200	-	Vit/blåvitrandig	Gliddraglakan		Art. nr. 4011S1

Material: Liggyta/bäddfilkar: bomull/polyester. Glidtyr: duchesse (polyester)
Skötselråd: Använd inte sköljmedel. Tvättas före första användning. Torkning/tumling i max 70°.



CE Medicinteknisk klass I produkt