



Säker fixering Tillförlitligt

Tegaderm™ HP är en tunn och elastisk polyuretanfilm med ramsystem och ett häftämne anpassat till fuktig hud. Förbandet är avsett att användas till sår och fixering av infarter, speciellt på fuktiga hudområden.

Tegaderm™ HP

Polyuretanfilm för fuktiga hudområden

Tegaderm HP är en hudvänlig, tunn och elastiskt polyuretanfilm avsett att användas till sår och fixering av infarter. Den speciella filmen och häftämnet ger en bättre vidhäftning under fuktiga förhållanden.

Egenskaper

Film och häftämne för fuktig hud – anpassad för fuktiga hudområden. Även lämplig att användas på barn

Mycket tunn och elastisk – komfortabelt för patienten

Lätt att applicera – 3Ms populära ramsystem säkrar en aseptisk hanteing

Transparent – möjliggör inspektion genom förbandet

Semipermeabel - Tegaderm™ HP är genomsläpplig för fukt och syre, vilket låter huden "andas"

Bakterie- och virus* barriär – skyddar instickstället eller såret mot kontamination utifrån

Noteringstejp - en Micropore™ tejp sitter på ramen av vissa storlekar, kan användas till signering och till borttagning av förbandet

*Laboratorietester visar att Tegaderm HP skapar en virusbarriär (HIV-1 och HBV) så länge förbandet är intakt utan läckage

Applicering

Välj en lämplig storlek av förbandet.

1. Håll förbandet i fliken på sidan och dra bort skyddspappret från baksidan. Håll förbandet över såret eller insticksstället med den häftande sidan nedåt. Undvik att sträcka eller dra i förbandet.
2. Tryck försiktigt förbandet på plats och stryk med handen från mitten och utåt.
3. Avlägsna ramen samtidigt som du pressar lätt på förbandet för att säkerställa en god vidhäftning av kanten på förbandet.

Borttagande: Ge huden stöd och "stretcha" av förbandet, för att förebygga mekaniska hudskador.

Indikationer:

Tegaderm HP är framtagen för att ge en bättre vidhäftning under fuktiga förhållanden.

- Fixering av infarter och medicintekniskt material t ex centrala venkaterar, insulinpumpar och subcutan venport.
- Rena kirurgiska sår - som ett postoperativt förband
- Ytliga hudskador
- Täckförband - över andra förband
- Trycksårsprofilax - som skydd mot hudskador orsakade av friktion och skjuvningseffekt

Det pålitliga varumärket Tegaderm™

- Enkelt
- Pålitligt
- Ändamålsenligt



Hälsovård
3M Svenska AB
191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00 vxl
Fax: 08-92 22 89
www.3M.com/se

Beställningsinformation

Art nr	Storlek	Ant/fp
9534HP	6 x 7 cm	100
9536HP	10 x 12 cm	50
9545HP	5,6 x 6,4 cm	50
9546HP	10 x 11,5 cm	50
9548HP	14 x 16,5 cm	10
9543HP	11,5 x 12 cm	12