

Exclusive

Hygienmadrass



With  **Lentex**[®]

En tryckförebyggande madrass.

FUNKTION

STANDARD

FÖREBYGGANDE

BEHANDLANDE



Järven Health Care

Exclusive

Exclusive hygienmadrass är en 3-skiktsskivmadrass med en fast kärna omsluten av ett mjukt ytskikt, volymvikter 23+40+23 kg/ m³. Skikten är ihoplimmade för minska risken att de glider isär. Ytskiktet Lentex® omsluter madrasskärnan..

VÅRT UNIKA YTSKIKT LENTEX®


Denna madrass är utrustad med Järvens unika ytskikt Lentex® som lamineras direkt på skumkärnan. Det medför att den saknar sömmar och dragkedjor.

Ytskiktet levereras endast i en fräsch vit färg som gör det lättare att upptäcka föroreningar på madrassens yta.

Lentexmadrassen rengörs genom avtorkning och desinficering direkt på madrassen.

Aktiv Membran-teknologi gör att madrassen kan andas och minskar risken att vätska kan tränga in.

Vårt unika ytskikt Lentex® är tillsammans med skumkärnan utvecklad för att minska trycket mot patienten och ge en god komfort.

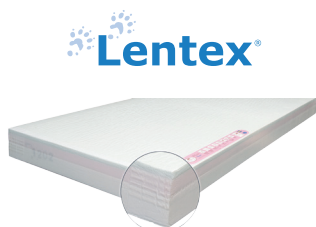

FAKTA

Art. Nr.	Storlekar
5700	190-205 x 80 x 13 cm
5701	190-205 x 85 x 13 cm
5702	190-205 x 90 x 13 cm

Madrassvikt

Ca. 7-9 kg beroende på längd och bredd (standardstorlekar).

Garanti - Madrasskärnan

3 år på utmattning av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11.

Garanti - Lentex

5 år på vidhäftningen av Lentex.

Brandstandard

Madrassen är testad och uppfyller SS 87600 01, testmetod NT-Fire 037 A+B.

Brukarvikt: T.o.m. 150 kg. Läs mer om brukarvikt i vår bruksanvisning.

Återvinning

Madrassen med överdrag är helt återvinningsbar och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

Märkning: Tilverkningsår, månad, vecka, EAN, skötselanvisningar, uppfyllda standarder samt placering i säng.



Tryckmättningsresultat

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
airO	28,5	43,1	45,2
Soft Euroflex	28,9	61,1	52,1
Waterlily	30,1	55,9	56,4
Exclusive	35,9	53,0	59,2
Soft Comfort	37,5	53,6	60,5
Comfort	41,9	54,5	64,5

Lågt värde ger lågt tryck mot kroppen, alla värden i mm Hg. För tunga brukare är det särskilt viktigt att trycket under "stor intryckskropp, 600 N" är så lågt som möjligt.

FAKTA TRYCKMÄTNING

För att komma ifrån individuell inverkan från olika människor har Swerea IVF utvecklat intryckskroppar, som simulerar formen hos valda delar av människokroppen. Genom att ge dessa intryckskroppar en belastning, som är representativ för en medeltung människokropp kan man med hjälp av tryckmattor på ett objektivt sätt värdera olika madrasser och sängar. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard med beteckningen SS 876 00 13

Klassificering av tryckresultat för madrasser i nyskick

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	<30,0	30,0-34,9	35,0-39,9	40,0-44,9
Stor intryckskropp 600 N	<45,0	45,0-52,9	53,0-60,9	61,0-68,9
Liten intryckskropp 300 N	<45,0	45,0-52,9	53,0-60,9	61,0-68,9

Denna produkt ingår i vårt hygienmadrassortiment med Lentex®



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.


Järv Health Care

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660-22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se